

Ortopedski korektor za nožne prste OrtoFeet

M254: Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji!

Dobit ćete u paketu

- OrtoFeet korektor za nožne prste za lijevo i desno stopalo (2 komada).

Prednosti

- nježno, ali učinkovito ispravlja zakrivljene prste i bol u stopalima,
- pristupačan način za rješavanje problema sa stopalima,
- pouzdano ispravlja probleme sa zakrivljenim palcem (hallux valgus),
- izdržljiv, ali prozračan tekstil pobrinuće se da korektor uvijek bude na mjestu,
- silikonski nastavci (ortotički jastučići) na palcu i stopalu potaknuće prste u pravi, prirodni položaj,
- zahvaljujući mekom silikonu i prozračnom tekstilu, Vaš će korak uvijek biti udoban i lagan,
- izbjegavajte operaciju s dugim oporavkom i koristite OrtoFeet,
- možete ih koristiti u bilo kojoj cipeli,
- namijenjeni za upotrebu na koži ili čarapama,
- možete ih koristiti danju i noću,
- bolna stopala postaće prošlost,
- prsti će se namjestiti i postaviti u prirodni položaj,
- konačno ćete ponovo obući svoje omiljene cipele i sandale.



Uporaba



Koristite OrtoFeet i bol u stopalu će nestati. Prsti će se vratiti u prirodni položaj, pa neće više biti neugodnosti pri hodanju ili stajanju.

Stavite ga na stopalo ili čarape. Silikonski jastučić treba biti između palca i kažiprsta stopala.

Preporučujemo da ga počnete koristiti postepeno. Prvo nosite OrtoFeet 20 minuta, a zatim postepeno produžite upotrebu. Pritom obratite pažnju na to kako se noge navikavaju na napetost tokom upotrebe. Kad se Vaša stopala naviknu na to, možete koristiti OrtoFeet cijeli dan.

Udobni silikonski jastučići osiguraće uvijek ugodan korak tokom upotrebe. Zato ćete ih rado koristiti i noću.

Upozorenja

- Ne koristiti tokom vežbanja i tokom vožnje.
- Ako ima bilo kakvih nedostataka na proizvodu, obratite se svom prodavaču.

Proizvod smijete koristiti samo u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se nalazite. Prije putovanja provjerite da li je upotreba proizvoda ograničena i da li Vam je potrebna dozvola za korištenje.

Garancija

Garancija važi 12 meseci. Prijavite se u Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garanciju možete potraživati uz račun koji ste dobili prilikom isporuke proizvoda.

Garantujemo besprijekoran rad proizvoda u Bosni i Hercegovini, u roku od 12 mjeseci od prijema proizvoda. Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke na robi.

Za sprovođenje garancije, pišite nam na info@maaarket.ba. U poruci opišite grešku, priložite fotografiju ili video greške i napišite broj Vaše narudžbe. Kompanija će se pobrinuti za zamjenu proizvoda ili povrat novca, ukoliko je Vaš zahtjev opravdan. Rok trajanja proizvoda je 24 mjeseca od datuma preuzimanja.

Uputstva za odlaganje i recikliranje



Budite oprezni kada odlažete ovaj proizvod. Simbol precrtane korpe za otpatke upozorava da proizvod ne pripada EU. Vodite računa o okolišu i odložite proizvod u odgovarajuću kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom, obratite se najbližem centru za odlaganje otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Izjava proizvođača da je proizvod usklađen sa važećim EU direktivama.



Upozorenje! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine, jer mogu udahnuti ili progutati male čestice.