

# Ortopedski korektor za nožne prste OrtoFeet

## M245: Upute za uporabu

Čestitamo vam na kupnji!

### Dobit ćete u paketu

- OrtoFeet korektor za nožne prste za lijevo i desno stopalo (2 komada).

### Prednosti

- **nježno, ali učinkovito** ispravlja zakrivljene prste i bol u stopalima,
- **pristupačan način** za rješavanje problema sa stopalima,
- pouzdano ispravlja probleme sa **zakrivljenim palcem (hallux valgus)**,
- **izdržljiv, ali prozračan tekstil** pobrinuće se da korektor uvijek bude na mjestu,
- **silikonski nastavci (ortotički jastučići)** na palcu i stopalu potaknuće prste u pravi, prirodni položaj,
- zahvaljujući **mekom silikonu** i prozračnom tekstilu, Vaš će korak uvijek biti udoban i lagan,
- **izbjegavajte operaciju** s dugim oporavkom i koristite OrtoFeet,
- možete ih koristiti **u bilo kojoj cipeli**,
- namijenjeni za upotrebu na koži ili čarapama,
- možete ih koristiti **danju i noću**,
- bolna stopala postaće prošlost,
- **prsti će se namjestiti** i postaviti u prirodni položaj,
- konačno ćete ponovo **obuti svoje omiljene cipele i sandale**.



### Uporaba



Koristite OrtoFeet i bol u stopalu će nestati. Prsti će se vratiti u prirodni položaj, pa neće više biti neugodnosti pri hodanju ili stajanju.

Stavite ga na stopalo ili čarape. Silikonski jastučić treba biti između palca i kažiprsta stopala.

Preporučujemo da ga počnete koristiti postepeno. Prvo nosite OrtoFeet 20 minuta, a zatim postepeno produžujte uporabu. Pritom obratite pažnju na to kako se noge navikavaju na napetost tokom uporabe. Kad se Vaša stopala naviknu na to, možete koristiti OrtoFeet cijeli dan.

Udobni silikonski jastučići osiguraće uvijek ugodan korak tokom uporabe. Zato ćete ih rado koristiti i noću.

## Upozorenja

- Nemojte koristiti tijekom vježbanja i tijekom vožnje.
- Ako ima bilo kakvih nedostataka na proizvodu, obratite se svom prodavaču.

Proizvod smijete koristiti samo u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se nalazite. Prije putovanja provjerite je li uporaba proizvoda ograničena i da li Vam je potrebna dozvola za korištenje.

## Jamstvo

Jamstvo vrijedi 12 mjeseci. Provodite ju u Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Jamstvo možete potraživati uz račun koji ste dobili prilikom isporuke proizvoda.

Garantiramo besprijekoran rad proizvoda u Hrvatskoj, u roku od 12 mjeseci od primitka proizvoda. Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke na robi.

Za provođenje jamstva pišite nam na [info@maaarket.hr](mailto:info@maaarket.hr). U poruci opišite pogrešku, priložite fotografiju ili video greške i napišite broj svoje narudžbe. Tvrtka će organizirati zamjenu proizvoda ili povrat novca ako je vaš zahtjev opravdan. Vijek trajanja proizvoda je 24 mjeseca od datuma primitka.

## Upute za odlaganje i recikliranje

Budite oprezni pri odlaganju ovog proizvoda u smeće. Prekriženi simbol kante za otpatke na kotačima upozorava vas da proizvod nije kućanski otpad u EU-u. Pazite na okoliš i stavite proizvod u odgovarajuću kantu. Nepravilno odlaganje može imati negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi. Za pravilno upravljanje otpadom obratite se najbližem centru za gospodarenje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu s važećim EU smjernicama.



Upozorenje! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine, jer mogu udahnuti ili progutati male čestice.